

[Fiche technique]

Sangle araignée

Réf. 509027 - 509026

Conçue pour assurer une immobilisation complète, rapide et facile du corps, elle est particulièrement indiquée pour un usage sur tout type de plan dur et civières. Avec un anneau permettant de régler la hauteur de chaque sangle.


Caractéristiques techniques

Informations complémentaires	Lavable en machine à 40°C.
Dimensions	(L x l) 146 x 77 cm (adulte) / 121 x 64 cm (enfant) / Largeur des sangles 5 cm
Matière	Toile en polypropylène avec attaches velcro
Versions disponibles	2 modèles disponibles : adulte et enfant.
Instructions d'utilisation	Mode d'emploi : Avant utilisation de la sangle repérer les blessures du patient et faire attention à celles-ci. L'opération de sanglage du patient doit être réalisée par du personnel habilité et formé. Vérifier le produit avant son utilisation. 1- Placer le patient sur le plan dur . 2- Fixer les différentes parties du corps du patient sur le plan dur à l'aide de la sangle araignée. 3- Vérifier si les sangles maintiennent correctement le patient. 4- Au cours du transport du patient prêter attention aux scratches au niveau des cuisses du patient et les ajuster si nécessaire.

Références

Réf. 509026	Sangle araignée enfant pour plan dur Enfant - (Lxl) 121 x 64 cm / Largeur des sangles : 5 cm
Réf. 509027	Sangle araignée adulte pour plan dur Adulte - (Lxl) 146 x 77 cm max / Largeur des sangles : 5 cm.

Photos

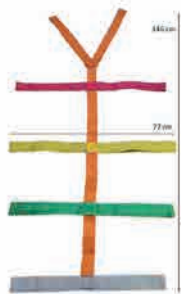

Sangle araignée adulte
réf. 509027



Sangle araignée enfant
réf. 509026